

## MASCARILLA VIRAL STOP®

El equipo de científicos expertos de Proneem ha desarrollado la primera mascarilla barrera VIRAL STOP®, probada y certificada virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad Covid-19. VIRAL STOP® destruye hasta el 99,9% de los virus SARS-CoV-2 en 30 minutos cuando están en contacto con el tejido.

### RENDIMIENTOS

Este artículo ha sido sometido a un tratamiento virucida, conforme a la norma ISO 18184-2019 (Norma internacional de determinación de la actividad virucida de los productos textiles). La sustancia activa es el cloruro de plata. VIRAL STOP® responde a las obligaciones de la reglamentación europea sobre los productos biocidas n°528/2012. Este tratamiento está certificado Oeko-Tex-Standard 100, certificación que garantiza una alta seguridad para el consumidor.

Protocolo de ensayos descrito en el documento DGA del 25 de marzo de 2020

Mascarilla categoría 1 «UNS 1» - SPEC S76-001-2020

Eficacia de filtración de partículas de 3µm: > 95%

Respirabilidad: ensayo de permeabilidad en el aire: 305 L.M2.S-1

La mascarilla Viral Stop® es ultra respirable y ultra filtrante.



### RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN DE LA MASCARILLA

Colocar la mascarilla de forma que cubra la nariz y la boca, comprobar de ajustarla al máximo al rostro. Comprobar que no existen chorros de aire (aerosoles) enviados hacia los ojos, al espirar fuerte. Atención, la mascarilla se lleva con la etiqueta hacia el exterior como en la foto.

### USO Y MANTENIMIENTO DE LA MASCARILLA

Esta mascarilla está tratada con Viral Stop® por su superficie externa para neutralizar el virus y crear una barrera protectora antiviral. Permite un uso de larga duración sin lavado, se lava cuando está sucia y mantendrá su eficacia antiviral durante todo el periodo de uso. Se recomienda conservar su mascarilla en este embalaje.

#### MÉTODO DE LAVADO

Esta mascarilla ha sido diseñada para ser reutilizada y lavada 20 veces a 60°C con un detergente clásico. Se recomienda secarla en un tendero. Planchado autorizado.

#### ALMACENAMIENTO

Las mascarillas que no se utilizan deben conservarse en un lugar limpio, seco y protegido de la luz.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composición: Capa 1: 55% algodón / 45% poliéster  
Capa 2: 55% algodón / 45% poliéster

Dimensiones: 18,5 cm x 9,5 cm (L x l)  
Talla: Adulto

Color del producto: Azul marino (cara exterior e interior)

Forma: Rectangular

Envasado: Envasada en bolsas individuales y en un cartón de 300 unidades  
Vista cara exterior e interior



Utilice los biocidas con precauciones. Antes de cualquier utilización, lea la etiqueta y las informaciones relativas al producto.