



# Lingettes Prodene Aseptil

Lingettes antiseptiques et désinfectantes

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

AFNOR Cert. 66633



**Lingettes antiseptiques et désinfectantes** pour mains, objets, surfaces et dispositifs médicaux non invasifs\*.

## Marchés cibles :

Milieu médical et paramédical: hôpitaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, services d'urgences...

- ✓ **Multi-usages : mains, surfaces et dispositifs médicaux**
- ✓ **Large spectre d'activité (bactéries, levures, sélection de virus)**
- ✓ **Pratique : 1<sup>ère</sup> lingette tirée**
- ✓ **Conçues et fabriquées en France**

## Substances actives de la solution

- Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg)
- Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 g/kg)
- Chlorhexidine digluconate CAS n°18472-51-0 (1.2 g/kg)

## Caractéristiques

- Odeur : mentholée
- pH :



pH (pur) : 4.5 – 6.5

## Conservation

- Conserver dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Eviter les températures supérieures à 40 ° C .
- Avant ouverture conservation 2 ans à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.
- Dès l'ouverture, utiliser dans le mois.

## Législation

- Produit biocide TP1 et TP2.
- Usage exclusivement professionnel.

## Environnement

- Éliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets. Ne pas jeter le produit dans l'environnement.

## Mode d'emploi



- Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.
- Bien refermer le conditionnement après usage.



### Usage mains:

Frotter la lingette sur les mains préalablement nettoyées, pendant au moins 30s. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.



### Usage surfaces et

### dispositifs médicaux non invasifs :

Frotter la lingette sur les surfaces et les dispositifs médicaux à désinfecter, pendant au moins 1 minute. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.



Ne pas rincer.  
Laisser sécher.



Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets.

\* Lingettes désinfectantes de dispositifs médicaux destinées à la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement (exemples : lits, tables d'opération, moniteurs, etc.)

# Lingettes Prodene Aseptil

Lingettes antiseptiques et désinfectantes

## Propriétés microbiologiques de la solution

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040	1 min
	▪ EN 1276*	30s
	▪ EN 13727+A2*	30s
	▪ EN 13727+A2* : <i>SARM, ERV, EBLSE</i>	30s
	▪ EN 13697**	1 min
	▪ EN 14561*	5 min
Levures	▪ EN 1275, <i>Candida albicans</i>	1 min
	▪ EN 13624* (v.2013), <i>Candida albicans</i>	1 min
	▪ EN 13697*, <i>Candida albicans</i>	5 min
	▪ EN 1650+A1*, <i>Candida albicans</i>	1 min
	▪ EN 14562*, <i>Candida albicans</i>	5 min
Virus	▪ EN 14776*, Rotavirus	1 min
	▪ EN 14476*, Virus de la vaccine (MVA)	30s
Couvre notamment les virus enveloppés suivants: Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV...		

\* Etudes réalisées en conditions de propreté

\*\* Etudes réalisées en conditions de saleté

**SARM** : *Staphylocoque aureus* résistant à la méthicilline, **ERV** : *Enterococcus faecium* Résistant à la Vancomycine, **EBLSE** : *Escherichia coli* à Beta Lactamase Spectre Etendu

## Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des instruments chirurgicaux. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ce produit est réservé à l'usage professionnel pour les mains, les dispositifs médicaux dispositifs médicaux destinés à la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement ou les surfaces présentant une surface plane et sans rugosité, et n'étant pas en contact avec de la peau lésée ni avec des denrées alimentaires. L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), ni du protocole de stérilisation des instruments (pouvant être stérilisés par un procédé approprié). En cas de réutilisation, risque de contamination. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, se désinfecter les mains ou mettre des gants propres. Une lingette sèche ne doit jamais être utilisée. Rincer à l'eau les emballages souillés. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Alternier les produits désinfectants. Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

## Conditionnements

Conditionnement	Code produit
12 boîtes de 100 lingettes Palette de 100 cartons	U1A84JI022
6 seaux de 450 lingettes Palette de 24 cartons	U1A10FM00G
48 sachets de 30 lingettes Palette de 40 cartons <sup>1</sup>	U1A84TT01W

<sup>1</sup> Non-tissé en 100% viscose biodégradable

Rev.: 9/ 22.08.2019

Laboratoires Prodene Klint – a GOJO Family company

8, rue Léon Jouhaux – 77183 Croissy-Beaubourg – France – Tél: +33 (0)1 60 95 49 00 – Fax: +33 (0) 1 60 95 49 49

Email: [info@GOJO.fr](mailto:info@GOJO.fr) – <http://www.prodene-klint.com>

